

## Бандаж абдоминальный ПО-30Р/2. Высота 30 см.

### Особенности:

- высота - 30 см
- тройная утягивающая панель
- влаго- и воздухопроницаемый материал с высоким содержанием хлопка, устойчивый к прорезанию отверстий для стомы
- пластиковые «антискручивающие» вставки
- хлопковая панель на область раневой поверхности
- идеально "садятся" по фигуре, незаметны под одеждой
- цвет: бежевый

### Показания к применению:

- реабилитация после всех видов операций на органах брюшной полости
- реабилитация после проведения кесарева сечения
- профилактика послеоперационных грыж
- удержание уже образовавшихся грыж белой линии живота
- после липосакции в области живота, спины и других пластических операций
- слабость передней брюшной стенки
- при стоме
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

### Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- синдром портальной гипертензии
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

### Рекомендации:

ручная стирка при  $30^{\circ}\text{C}$ , стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку



S	M	L	XL	XXL
68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

### Инструкция по применению:

- надевать лежа, если врачом не рекомендовано иное

### Правила хранения:

- в помещениях с температурой от  $10^{\circ}$  до  $25^{\circ}\text{ C}$  и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

### Состав:

- хлопок - 60%
- полиамид - 35%
- эластан - 5%

### Гарантии:

Гарантийный срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

### Рекомендации по уходу

